

Pèse-personne

avec Bluetooth et gestion de données
dans une application dédiée

Guide d'utilisation

BE 1511
adeVital
Analysis



INDICE DE MASSE
CORPORELLE



TECHNOLOGIE
STEP-ON



DÉSACTIVATION
AUTOMATIQUE



MERCI

d'avoir décidé d'acheter un pèse-personne appartenant à la famille de produits adeVital.

Tous les produits de la gamme **innovante d'adeVital – pèse-personne et balance d'analyse corporelle, tensiomètre, et moniteur d'activité** – sont équipés d'une fonction Bluetooth permettant la transmission de toutes les données à l'application adeVital^{plus}. L'application adeVital^{plus} est gratuite à télécharger sur l'App Store et sur la boutique Google Play. L'interface utilisateur clairement organisée de l'application adeVital^{plus} permet de suivre de façon simple et claire progrès et résultats. Les données concernant votre santé sont donc disponibles à tout moment et toujours à jour.

CONSIGNES DE SECURITE ET D'UTILISATION

CONSIGNES DE SECURITE

Il est important de tenir compte des signes et des symboles d'avertissement pour utiliser correctement et de façon sûre ce produit et se protéger contre les blessures.



Symbole pour : « Lisez le manuel d'utilisation et suivez les consignes de sécurité et d'avertissement »



ATTENTION !

Le pèse-personne BE 1512 d'ADE vous offre un moyen simple de surveiller votre santé.

Veuillez garder à l'esprit que ce dispositif est destiné aux adultes désireux de mesurer et de surveiller leur poids et leur IMC. Les informations rendues disponibles par ce dispositif ne sont en aucun cas destinées à traiter, guérir ou prévenir les maladies. Le pèse-personne BE 1512 est équipé d'une fonction de transmission de données Bluetooth. Les équipements de communication RF portables et mobiles peuvent affecter les appareils électriques. Les appareils électriques font l'objet de précautions particulières concernant la compatibilité électromagnétique et doivent être installés et utilisés conformément à ces instructions.

INFORMATIONS D'UTILISATION



Le pèse-personne BE 1512 d'ADE prend la mesure du poids et détermine l'IMC.

Le poids et l'IMC calculé sont disponibles dans l'application adeVital^{plus} et sont affichés sous forme de diagrammes et de tableaux dans l'application. Le poids est également indiqué sur l'écran de la balance. Les appareils mobiles compatibles sont l'iPhone 4S, l'iPhone 5, l'iPhone 5S, l'iPhone 6, l'iPhone 6 plus, l'iPod touch (5e génération), l'iPad 3, l'iPad Air, l'iPad mini et les versions ultérieures, ainsi que les appareils avec Android à partir de la version 3.0. Compatibilité requise avec Bluetooth 4.0. En raison de la variété des appareils disponibles sur le marché et du développement continu des systèmes d'exploitation, nous ne pouvons pas garantir la compatibilité.

Waagen-Schmitt n'assume aucune responsabilité quant aux dommages ou pertes causées par ces pèse-personnes ou quant aux réclamations de tiers. Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé. Il n'est pas destiné à être utilisé de façon professionnelle dans les hôpitaux ou les établissements médicaux.

MISE EN MARCHÉ

ÉLÉMENTS DE LA BALANCE

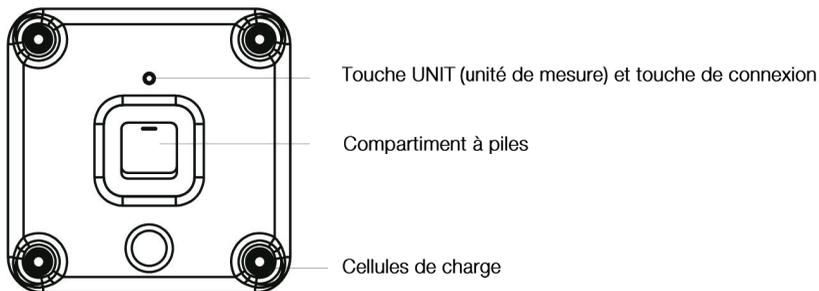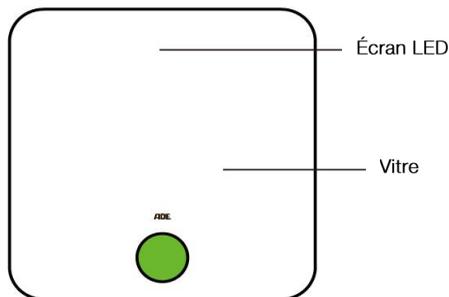

kg	Kilogramme		Connexion Bluetooth
lb	Livre		Transmission de données
st	Stone		
lb			

INSERTION DES PILES

- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles sur la face inférieure de la balance.
- Insérez les piles (4 x 1,5 V AAA) dans le compartiment à piles en tenant compte des marques de polarité qui y sont inscrites.
- Les chiffres « 8888 » s'affichent sur l'écran LED.
- Fermez le couvercle du compartiment à piles et attendez que « 0.0 kg » apparaisse sur l'écran LED.



SELECTION DE L'UNITÉ DE MESURE

En appuyant sur la touche UNIT sur la inférieure de la balance, sélectionnez l'unité de mesure spécifique à votre pays.

INSTALLATION DE L'APPLICATION ADEVITAL PLUS ET CONNEXION

À l'aide de la technologie Bluetooth 4.0, les appareils mobiles dotés de la fonction Bluetooth peuvent recevoir vos données personnelles. L'application adeVital^{plus} est gratuite à télécharger sur l'App Store et sur la boutique Google Play. Vous pouvez y rechercher « adeVital plus » puis l'installer sur votre appareil mobile, ou balayez simplement l'un des codes QR suivants, en fonction de ce que requiert votre appareil.



SUIVI POSSIBLE AVEC LE PESE-PERSONNE

- Affichage des données quotidiennes associées à toutes les valeurs déterminées
- Affichage de la tendance
- Suivi des résultats, poids cible
- Génération de courbes de progression pour divers intervalles
- Présentation et suivi des progrès clairs de toutes les données et valeurs sous forme de diagramme, graphique ou tableau.
- Transmission de données simple via la fonction de messagerie intégrée, Facebook ou Twitter.

Il vous suffit d'installer l'application adeVital^{plus} spécialement développée puis de connecter votre balance à votre appareil mobile. Vous pouvez ensuite utiliser les nombreuses fonctions présentes dans l'application adeVital^{plus}.



L'application adeVital^{plus} est disponible sur iPod touch (5e génération), iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad 3, iPad Air, iPad Mini et les versions plus récentes, ainsi que sur les appareils Android à partir de la version 3.0. Compatibilité requise avec Bluetooth 4.0.

PROGRAMMATION ET CONNEXION/SAISIE DES INFORMATIONS PERSONNELLES

COUPLAGE DE LA BALANCE AVEC L'APPLICATION ADEVITAL PLUS



Lancez l'application adeVital^{plus} installée et remplissez tous les champs présents avec vos informations personnelles. Dans la rubrique « Appareils », sélectionnez le grand symbole « + AJOUTER APPAREIL ».

Appuyez ensuite sur la touche UNIT sur la face inférieure de la balance pendant cinq secondes, jusqu'à ce que deux zéros clignotant en alternance s'affichent sur l'écran. L'application adeVital^{plus} vous montrera quand votre balance est trouvée. Si la balance n'a pas été trouvée, appuyez sur « mise à jour ».


Lorsque la balance a été trouvée, appuyez sur l'appareil dans l'application adeVital^{plus} afin de le coupler à l'application. Si le couplage est réussi, le symbole [] s'affiche sur l'écran de la balance.

TRANSMISSION DES DONNEES DES DIFFERENTS UTILISATEURS DE LA BALANCE A L'APPLICATION ADEVITAL PLUS

- Si les utilisateurs possèdent des appareils mobiles de différent type, les balances doivent d'abord être découplées avant d'être couplées à nouveau.

INDICATEURS SUR L'ECRAN

- Le symbole  et le symbole  s'affichent alternativement sur l'écran LED de la balance et indiquent que le processus de couplage est en cours.

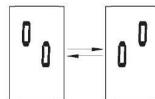

- Une fois la connexion réussie, le symbole  s'affiche sur l'écran LED.




- Dans le cas où la connexion échoue, « E1 » s'affiche sur l'écran LED.



COUPLAGE DE L'APPLICATION ADEVITAL PLUS AVEC L'APPLICATION APPLE SANTE

Si vous vous servez de l'application Apple Santé, vous pouvez la connecter à l'application adeVital^{plus} puis y analyser vos valeurs.

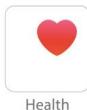

Pour coupler les deux applications, ouvrez le menu « Gestion » dans l'application adeVital^{plus} puis allez dans « Paramètres » => « Kit-Santé ». Une fois que vous y êtes, dans la catégorie « Valeurs des paramètres corporels », activez les données que vous souhaitez également analyser dans l'application Apple Santé. Puis, lancez l'application Apple Santé et dans le menu « Source », sélectionnez l'application adeVital plus. Dans la catégorie « Valeurs des paramètres corporels », activez les mêmes données que vous avez sélectionnées dans l'application adeVital^{plus}.


Après le couplage, l'application adeVital^{plus} avec l'application Apple Santé, vous pourrez analyser toutes les valeurs mesurées par la suite dans les deux applications.

FONCTION DE PESAGE PESAGE AVEC LE BE 1511 ET TRANSMISSION VERS L'APPLICATION ADEVITAL PLUS.



Avec la technologie **STEP ON (mesure automatique dès la montée sur la balance)**, le pèse-personne BE 1511 d'ADE s'allume automatiquement aussitôt que vous montez sur la plate-forme.

Placez-vous au centre de la balance, restez debout immobile et ne vous appuyez sur rien.

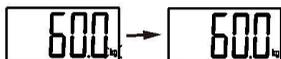

Restez immobile jusqu'à ce que « kg » arrête de clignoter sur l'écran.

Si votre balance a été liée avec succès à votre appareil mobile via Bluetooth, et que Bluetooth est activé, la balance effectue automatiquement la transmission de données.



Sur l'écran, le symbole Bluetooth  clignote maintenant. Ayez votre appareil mobile prêt, avec l'application adeVital^{plus} lancée ; à moins de dix mètres de votre balance. Toutes les valeurs qui sont déterminées sont automatiquement transmises via Bluetooth à l'application adeVital^{plus} à l'issue de la pesée.

Dès que cela se produit, vous pouvez, à tout moment, récupérer toutes les valeurs dans l'application adeVital^{plus}.

Indicateur	Signification	Explication
	Connexion Bluetooth réussie	Le symbole  disparaît après une transmission de données réussie. Vous pouvez ensuite vérifier vos données personnelles de santé sur votre appareil mobile.
	Transmission de données à l'application <i>adeVita^{plus}</i> : Après une transmission de données réussie le symbole disparaît.	Dans le cas où la transmission de données échoue, le  s'affiche à nouveau. Les données de mesure dans la file d'attente seront temporairement stockées dans la balance, puis transmises à l'application <i>adeVita^{plus}</i> à la fin de la pesée suivante.



ATTENTION !

- L'interférence est possible à proximité des appareils portant le symbole . Le pèse-personne peut interférer avec les appareils à proximité.
- Pour la transmission de données, ce produit doit être couplé avec un appareil Bluetooth à 2,4 GHz.

Comment éviter ou atténuer de possibles interférences ?

1. La distance entre le pèse-personne et l'appareil Bluetooth devrait être comprise entre 1 et 10 m. Aucun obstacle ne devrait pouvoir interférer avec la connexion Bluetooth s'établissant entre le pèse-personne et l'appareil Bluetooth.
2. Pour éviter les interférences, les autres appareils électroniques (en particulier, ceux capables de transmission ou de réception Bluetooth) doivent être maintenus à une distance d'au moins 1 m du pèse-personne.


MESSAGES D'ERREUR ET LEUR SOLUTION



ATTENTION !

En présence de fortes influences électromagnétiques, en faisant fonctionner un dispositif émettant des fréquences radio à proximité immédiate de la balance, la fonctionnalité de l'appareil ou la transmission de données peut s'en trouver altérée.

Aussitôt que l'influence perturbatrice s'arrête, le produit peut de nouveau être utilisé comme prévu, même si un redémarrage peut s'avérer nécessaire.

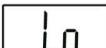Erreur	Description	Solution
	Témoin de surcharge !	La capacité maximale de la balance (180 kg) a été dépassée. Retirer immédiatement la charge de la balance, faute de quoi la cellule de charge pourrait s'endommager.
	Piles faibles. Le dispositif s'éteint au bout de 4 secondes.	Veillez toujours remplacer les quatre piles en même temps. Veuillez acheter des piles approuvées pour le remplacement.
	La connexion de votre balance à votre appareil mobile a échoué.	Veillez vérifier les points suivants : Bluetooth est ON (activé). L'application est ON (activée/lancée). La distance entre les deux appareils est inférieure à la portée maximale de la transmission Bluetooth (env. 10 m).

LORS DE LA MESURE

Erreur	Cause possible	Solution
Aucun témoin LED lorsque l'appareil est allumé.	Les piles n'ont pas été (correctement) insérées.	Insérez les piles correctement. <i>(Voir l'insertion des piles.)</i>
	Piles usagées.	N'achetez en remplacement que des piles approuvées. Remplacer toujours toutes les piles en même temps.

PENDANT LA TRANSMISSION DE DONNEES...

Erreur	Cause possible	Solution
L'appareil s'éteint automatiquement.	Les piles sont trop faibles.	Veuillez toujours remplacer les quatre piles en même temps. Veuillez acheter uniquement des piles approuvées en remplacement.
La transmission des données a échoué.	Bluetooth n'est pas activé sur l'appareil mobile.	Mettez Bluetooth sur ON via : « Réglage >> Général >> Bluetooth ».
	L'application n'a pas été activée (OFF).	Sur votre appareil mobile, appuyez sur le symbole de votre application pour la lancer.
	Hors de la portée maximale de Bluetooth.	Placez votre appareil mobile plus près de la balance.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Veuillez lire les instructions suivantes concernant l'entretien de l'appareil :

- Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer la poussière de l'appareil.
- Utilisez un chiffon doux et humide pour essuyer la saleté présente sur l'appareil. Ensuite, utilisez un chiffon doux et sec pour sécher l'appareil.
- Ne lavez pas l'appareil avec de l'eau, et ne le plongez pas dans l'eau.
- N'utilisez pas de détergents ou d'agents abrasifs, de produits chimiques ou de solvants. Cela peut conduire à des changements de couleur ou à des dysfonctionnements.
- L'appareil ne doit pas être démonté. En cas de problème, n'hésitez pas à contacter Waagen- Schmitt. *(Pour les coordonnées, voir la section Garantie)*

VOTRE BALANCE ET VOTRE ENVIRONNEMENT



Afin de garantir votre sécurité et la longévité de votre balance, veuillez éviter d'utiliser la balance dans les circonstances suivantes :



- Vous courez le risque de glisser si la surface de la balance est mouillée ou si vos pieds sont mouillés.



- Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe sur la balance, puisque le verre pourrait s'en trouver endommagé ou se briser.
- Veuillez ne pas utiliser la balance à proximité d'appareils de communication mobiles et à micro-ondes.



- Placez la balance sur une surface plane et solide (tuiles, planches, etc.). Sur un terrain accidenté, il existe un risque de renversement ; des mesures erronées peuvent se produire sur la moquette.



- Nettoyez la balance uniquement avec un chiffon humide. N'utilisez pas de solvants ou de produits de nettoyage abrasifs. Ne plongez pas la balance dans l'eau.



- L'appareil n'est pas approprié pour les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience et de connaissance. Les enfants ne devraient pas être autorisés à jouer avec l'appareil.

ÉVITEZ DE RANGER L'APPAREIL DANS LES ENDROITS SUIVANTS :

- À proximité de l'eau
- Exposition à des conditions de températures extrêmes, à une humidité élevée, à la lumière directe du soleil, à la poussière ou à l'air très salé
- Quand il existe un risque de se cogner ou de tomber
- À proximité de produits chimiques ou de gaz corrosifs
- À la portée de nourrissons ou d'enfants

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Pèse-personne BE 1512 ADE avec analyse adeVital
- Quatre piles alcalines AAA, 1,5 V
- Guide d'utilisation

GARANTIE

Waagen-Schmitt garantit la correction gratuite de défauts dus à des vices de fabrication ou à des matériaux défectueux avec une réparation ou un échange (hormis les piles et les pièces sujettes à l'usure) pendant 3 ans à compter de la date d'achat. Veuillez demander à votre revendeur de remplir et de tamponner la section concernant la garantie lors de votre achat. En cas de réclamation dans le cadre de la garantie, veuillez retourner la balance, avec la section concernant la garantie et en incluant des précisions sur la motivation de votre réclamation, à votre revendeur.



Waagen-Schmitt GmbH

Hammer Steindamm 27 – 29, 22089 Hamburg, Allemagne

DECLARATION DE CONFORMITE CE



Cet appareil est fabriqué en conformité avec les normes européennes harmonisées. Il est conforme aux prescriptions et directives CE ci-dessous :

- Directive CEM 2004/108/CE
- Directive R&TTE 99/5/CE

Cette déclaration n'est plus applicable si des modifications sont apportées à la balance sans notre approbation.

MISE AU REBUT

OBLIGATION LEGALE D'INFORMER SUR LA FAÇON DE SE DEFAIRE DES PILES

Les piles ne sont pas des ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de retourner les piles. Vous pouvez déposer vos piles usagées au point de collecte publique de votre communauté ou partout où les piles de même type sont vendues.

Veuillez remarquer :



Ces symboles peuvent être trouvés sur les piles :

- Li = Pile contenant du lithium
- Al = Pile contenant de l'alcali
- Mn = Pile contenant du manganèse

CR (Li) ; A (Al, Mn) ; AA (Al, Mn) ; AAA (Al, Mn)

ÉLIMINATION DE DECHETS D'APPAREILS ELECTRIQUES



Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme une ordure ménagère, mais doit être remis à un point de recyclage pour les appareils électriques et électroniques.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de votre communauté, des services d'élimination communaux ou de l'entreprise où vous avez acheté le produit.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du produit :	Pèse-personne BE 1512 ADE avec analyse adeVital
Dimensions :	Balance : 320 x 320 x 25 mm
Poids net :	env. 1,98 kg (sans les piles)
Écran :	Écran LED numérique
Unité de mesure :	kg/lb/st
Plage de mesure :	5 kg à 180 kg/ 0 st : 11 lb à 28 st : 5 lb/ 11 lb à 397 lb
Résolution :	0,1 kg/0,2 lb
Précision :	0 - 50 kg : ±0,3 kg ; 50 - 100 kg : ±0,4 kg ; 100-150 kg : ±0,5 kg ; 150 - 180 kg : ±0,7 kg
Conditions d'utilisation :	Température : 5 à 40 °C Humidité : ≤ 93 % d'humidité rel.
Conditions d'entreposage :	Température : -20 à 60 °C Humidité : ≤ 93 % d'humidité rel.
Alimentation :	6 V (4 x piles alcalines AAA)
Mise en marche automatique :	Technologie STEP ON
Arrêt automatique :	Environ 10 secondes, quand 0.0 est affiché Environ 15 secondes, après que les données de poids ont été enregistrées
Protection IP :	IPX0
Version du logiciel :	1.0

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques



Section garantie – 3 ans sur le pèse-personne (hormis les piles et les pièces sujettes à l'usure)

Expéditeur

Motif de la plainte

Date de l'achat _____

Veuillez envoyer cette section en y attachant la preuve d'achat à votre revendeur spécialisé.



Collectez, gérez et analysez les données de santé : Se servir de la nouvelle série de produits adeVital avec la fonctionnalité Bluetooth et l'application intelligente adeVital^{plus} est simple et clair.

C'est la nature de la santé moderne !